


Handleiding

Verblijfs-tilband

(Comfort Recline Sling Prism Medical)

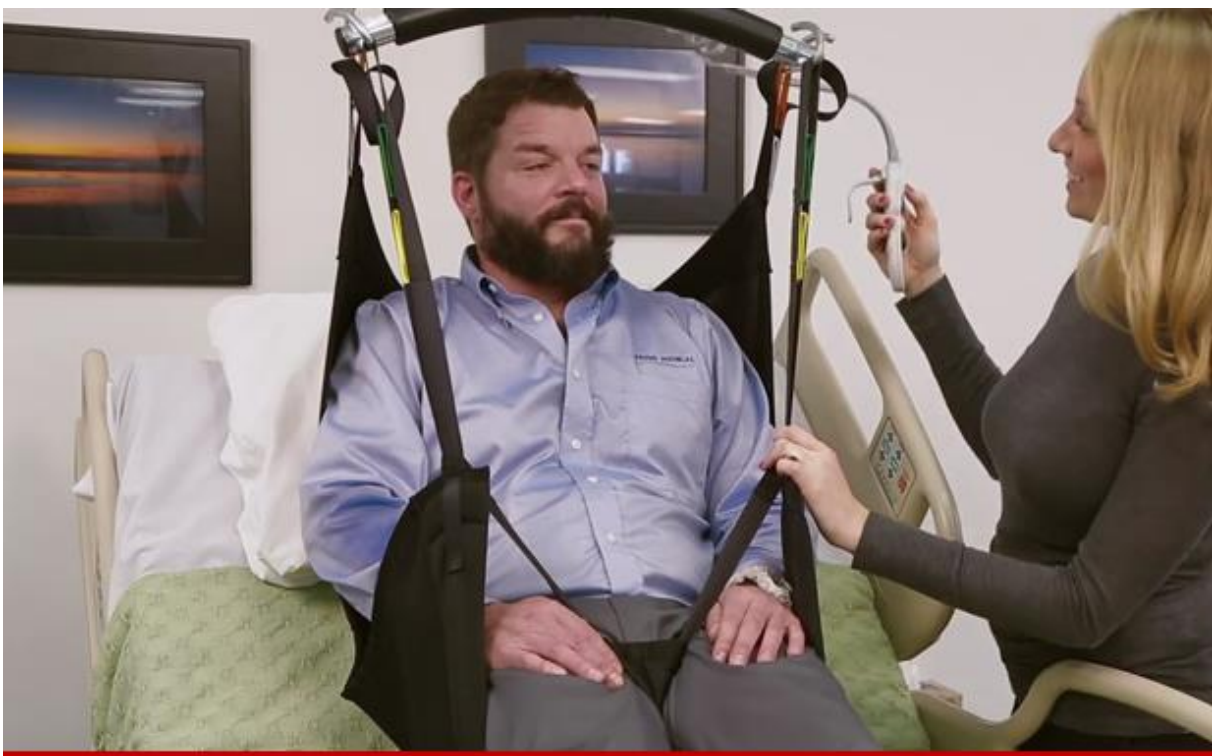

Toepassing

De Comfort Recline verblijfsband is ontworpen om personen van een zittende naar een liggende positie te tillen/begeleiden of visa versa, waarbij de gebruiker permanent in de tilband verblijft. Degene die de persoon in de tilband begeleid dient een verzorger te zijn die ervoor getraind is dit soort handelingen te verrichten. Verzorgers dienen altijd getraind te zijn in o.a. het aanleggen van een tilband, de transfer van de ene naar de andere positie en hoe om te gaan met het plafond gemonteerd tilsysteem.

Visuele controle voor ieder gebruik

Prism Medical tilbanden zijn geproduceerd volgens de richtlijnen van BS EN 10535:2006 “Tilsysteem voor transfer van gehandicapten/ ouderen “. Telkens alvorens de tilband te gebruiken en na het wassen van de tilband dient de tilband visueel te worden gecontroleerd op eventuele beschadigingen. Beschadigde tilbanden dienen altijd vervangen te worden en mogen niet meer gebruikt worden.



Op het label in de tilband staat belangrijke informatie over die tilband, als dit label niet meer leesbaar wordt in de regel geadviseerd om de tilband te vervangen. Bij een visuele inspectie dient op de volgende punten te worden gelet: zichtbare beschadiging aan de lussen van de tilband, loslatende stiksels, zichtbare beschadiging aan de stof van de tilband, zichtbare kleurverandering van de stof van de tilband en of de tilband compleet is, let hierbij op lussen, balijnen enz. Is het label in de tilband nog goed leesbaar?

Uitwisselbaarheid van verschillende merken


Het gebruik van tilbanden i.c.m. tilliften van verschillende merken is in principe mogelijk. Ongeacht het type en merk van de tilband of lift is er altijd een risico beoordeling. Uiteraard dient het bevestigingssysteem van de tilband (bijvoorbeeld lussen of clips) afgestemd te zijn op het bevestigingssysteem van het betreffende tiljuk (tweepuntsjuk / kanteljuk).

Neem contact op met Domicare als u een vraag heeft over het gebruik van uw tilband i.c.m. een tilsysteem van een andere fabrikant.

Maximaal tilgewicht

Het maximaal te tillen gewicht staat op het label in de tilband vermeld. Let wel, bij gebruik i.c.m. met de tillift en het tiljuk is altijd het minimaal aangegeven gewicht bepalend. Overschrijd nooit het maximaal te tillen gewicht.

Afmetingen

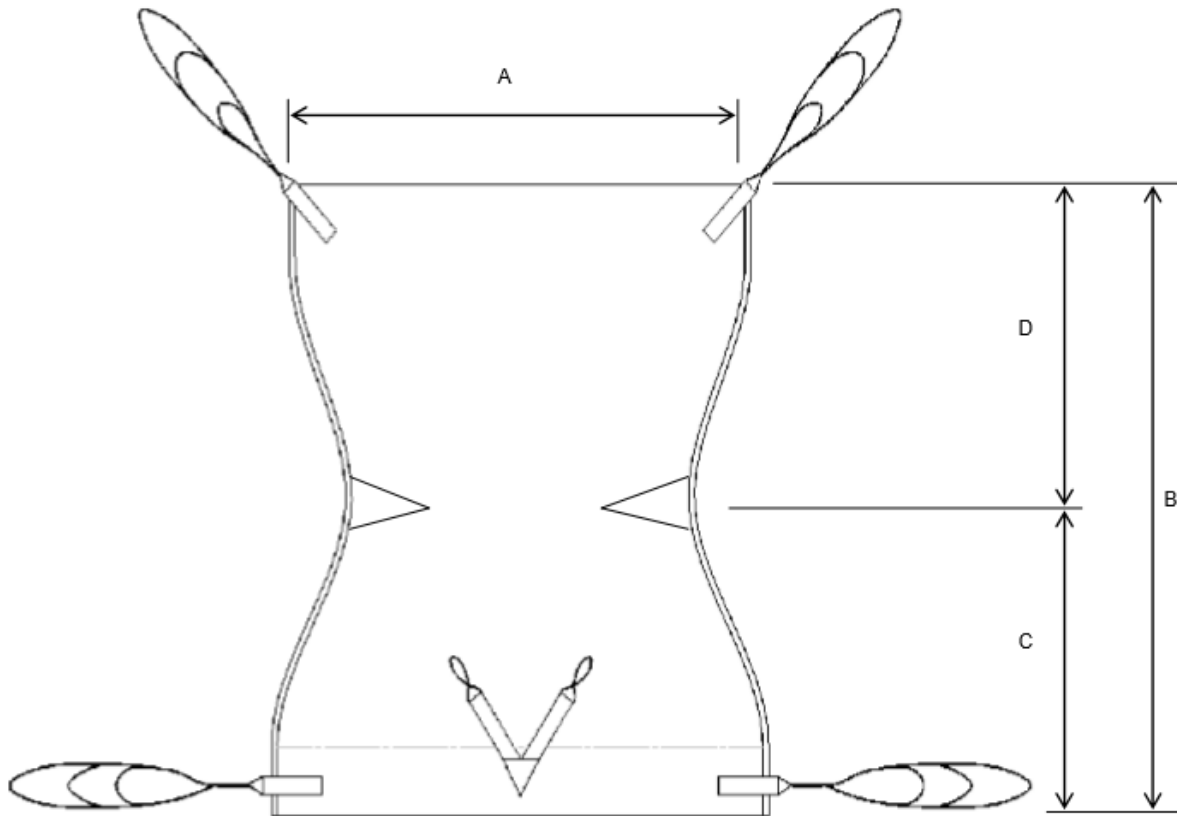

	A	B	C	D
Child	650	690	290	400
Junior	700	760	305	455
Small	780	960	430	530
Medium	880	1070	490	580
Large	1060	1210	570	640
X Large	1180	1310	620	690

(De opgegeven maatvoering kunnen afwijken t.o.v. de werkelijkheid met +/- 20mm)

Tillen vanuit een liggende positie

Plaats de tilband dubbelgevouwen achter de gebruiker



Omdat de gebruiker door de verblijfsband volledig wordt ondersteund, en permanent op de tilband ligt of zit kan de tilband uitsluitend worden aangebracht in liggende positie. Rol de gebruiker hiervoor op de zij en plaats de tilband dubbelgevouwen achter de gebruiker, rol de gebruiker vervolgens terug in de normale positie. Loop naar de andere zijde van het bed en leg de gebruiker nu op de andere zij zodat de tilband onder de gebruiker kan worden uitgerold. Zorg ervoor dat de tilband vlak ligt en plaats de gebruiker terug in de ligpositie.

Maak gebruik van de markeringen op de tilband om zo te controleren of deze zich op juiste hoogte van de ruggengraat van de gebruiker bevinden. Controleer of de tillussen zich aan de uiteinden bevinden.

Binnenste lussen verbinden met beenlussen



Haal de beenlussen door de korte lussen vanuit het midden van de tilband, de beenlussen worden *niet* gekruist. .Bevestig de 4 tillussen zorgvuldig aan het juk en de gebruiker kan getild worden.



Controleer of de lussen goed zijn bevestigd



Controleer zowel alvorens de lift te bedienen, als tijdens het omhoog gaan van de lift altijd of de lussen goed zijn bevestigd. Haal altijd de tilband weg om zo wrijving van de tilband op de huid te voorkomen. Om de tilband te verwijderen dient u bovenstaande procedure te herhalen alleen dan omgekeerd.

Transferpositie aanpassen



De comfort Recline tilband kan worden gebruikt voor het tillen in zowel zittende als liggende positie, afhankelijk van welke lussen worden gekozen. De lussen kunnen op verschillende posities aan het juk worden bevestigd waardoor de (hellings)hoek waaronder de gebruiker wordt getild wordt bepaald.

Deze positie kan tijdens de transfer niet worden aangepast. Bedenk dus vooraf in welke positie de gebruiker dient te worden getild. Eenmaal getild in een achterover liggende positie is het niet mogelijk de gebruiker rechtop in een (rol)stoel te plaatsen. Vanuit een recht zittende positie in de tilband is het wel mogelijk om de gebruiker naar een liggende positie te tillen, maak hierbij eventueel gebruik van de rugverstelling van het bed.

Zorg er altijd voor dat zowel links als rechts dezelfde positie wordt gekozen om te voorkomen dat de gebruiker scheef in de tilband wordt getild.



Kies de kortste lussen (wit) bij het schouder/hoofd gedeelte, zoals hierboven, voor meest rechtop zittende positie. Deze positie is het meest geschikt voor transfers naar de (rol)stoel en de beste manier om de gebruiker rechtop in de (rol)stoel te positioneren.

Kies de kortste lussen (geel) bij het beengedeelte voor meest liggende positie. Deze positie wordt slechts geadviseerd indien dit extra comfort oplevert voor de gebruiker, doordat de druk op het beengedeelte wordt verminderd. Deze positie is uitsluitend geschikt voor transfers naar bed, bad of douchebrancard.



Hoofdondersteuning

De tilband is ook leverbaar i.c.m. hoofdondersteuning



Producent

Prism Medical UK, Unit4 Jubilee Business Park,
Jubilee Way, Grange Moor, Wakefield, WF 4TD.

Importeur Nederland

Domicare B.V., Zweedsestraat 8A13, 7418 BG Deventer.

