

Gebruiksaanwijzing

Slings

BlackLabel

Sling
care

Inhoud

| | |
|-----------------------------|---|
| Type slings..... | 3 |
| Bevestiging..... | 3 |
| Visual clip..... | 3 |
| Conformiteit..... | 4 |
| Belangrijke informatie..... | 4 |
| Maattabel..... | 5 |
| Onderhoud..... | 5 |
| Etiket..... | 6 |
| Sling Calculator..... | 7 |

Wij feliciteren u graag met de aanschaf van een Sling geleverd door SlingCare.

Type slings

SlingCare onderscheid 2 hoofdgroepen en 7 verschillende types namelijk:

Actief



Actieve Slings
Tailor Made Slings

Passief



Standaard Slings
AllDay Slings
Seamless Slings
Toilet Slings
Tailor Made Slings


Bevestiging

Onze slings zijn uitgevoerd met de Visual Clip en/of met lussen. Gebruik slings met de Visual Clip alleen op tiljucken met een bevestiging zoals beschreven bij "Conformiteit" en gebruik slings met lussen alleen op tiljucken met de daarvoor bestemde haken.

Visual clip

De Visual Clip is een universele clip met een borging en een signalering. De twee rode vlakken van de voorkant en achterkant zullen groen worden wanneer de clip goed geborgd is en geeft u een indicatie dat u veilig kan gaan tillen. Het vastkoppelen van de clip aan de tillift doet u door de paddestoel door de opening van de clip te steken (grijze zijde van de clip)

Voor een extra controle dat de clip goed geborgd is kunt u kijken naar de ronde opening op de achterkant (witte zijde) van de clip, hier ziet u dan de paddestoel zitten. Na de tilhandeling dient de knop van de clip bedient te worden om de clip weer los te krijgen van tiljuck. De signaleringsvlakken worden direct weer rood.

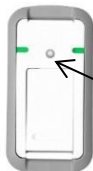

De VisualClip juist bevestigd;

Gleufjes aan zijkant zijn groen en het paddestoeltje is nu duidelijk zichtbaar aan de witte zijde.

Conformiteit

De door SlingCare geleverde slings voldoen aan de NEN-EN-ISO 10535 norm en mogen in combinatie met alle tilliften gecombineerd worden mits deze ook voldoen aan de NEN-EN-ISO 10535 norm.

Het ontwerp van de sling is zodanig dat de sling met de Visual Clip past op de tilliften die hier ook voor zijn ingericht en die voldoen aan de Europese normering NEN-10535. De tilliften die hiervoor zijn ingericht moeten voldoen aan een sling bevestiging met een;

- pendiameter tussen 6,8 en 8,2 mm
- kopdiameter tot 16 mm
- penlengte met een minimum van 6 mm
- koplengte met een maximum van 5,5 mm.

Belangrijke informatie

Voordat u een hulpvrager met een sling kunt gaan tillen, dient degene die de sling aanbrengt hiervoor deskundig te zijn. Vraag de leverancier om advies bij een niet goed passende sling. U kunt ook onze App raadplegen.



De door SlingCare geleverde slings zijn geschikt voor tillen van hulpvragers tot 200 kg. De Tailor Made Sling kan hier een uitzondering op zijn.



Bij verblijfsbanden dient de cliënt op de band te zitten, de tilband wordt dan aangebracht onder het zitvlak door (kan alleen liggend aangebracht worden). Dit in tegenstelling tot de standaard tilbanden die tot aan de stuit worden aangebracht.

Let op! Bij toiletbanden dienen de armen over de okselrollen geplaatst te worden. De armen bevinden zich buiten de tilband.

De levensduur van de sling hangt af van de condities waaronder de sling wordt gebruikt. Controleer daarom altijd vóór gebruik of;



- de slings beschadigd zijn
- de banden, naden en/of stiksels van de slings geen scheurtjes of andere beschadigingen vertonen
- de Visual Clips niet beschadigd zijn

Wanneer er sprake is van een dergelijke beschadiging, gebruik de sling dan niet en neem contact op met de leverancier.

Houdt de sling uit de buurt van scherpe voorwerpen, bijtende middelen of ander mogelijke oorzaken van beschadiging.

Indien er baleinen meegeleverd zijn bij de sling, dienen deze altijd gebruikt te worden.




Maattabel

| Maat | Bieskleur | Gewicht | Lengte |
|------|-----------|------------|------------|
| XXS | Grijs | 0-25 kg | 80-115 cm |
| XS | Bruin | 25-35 kg | 115-130 cm |
| S | Rood | 35-60 kg | 130-145 cm |
| M | Geel | 60-75 kg | 145-165 cm |
| L | Groen | 70-120 kg | 165-180 cm |
| LL | Paars | 80-150 kg | 180-210 cm |
| XL | Blauw | 100-180 kg | 180-215 cm |
| XXL | Oranje | 180-200 kg | >180 cm |

Onderhoud

- Houd de op het label aangegeven was- en droog temperaturen aan. Gebruik bij het wassen altijd een waszak.
- Verwijder, indien van toepassing, voor het wassen de kunststof baleinen en plaats deze vóór gebruik weer terug in de sling.
- Gebruik normale wasmiddelen waar geen oplosmiddel of bleek in zit.
- Slings niet strijken en vermijd mechanische druk zoals rollen en persen tijdens de was- en droogprocedure.
- Slings dienen gewassen te worden als medische apparatuur, reinig en desinfecteer de slings uitsluitend in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant.
- Vul bijgeleverd logboek bij voorkeur na elke wasbeurt in, maar minstens 1x per maand.

Etiket

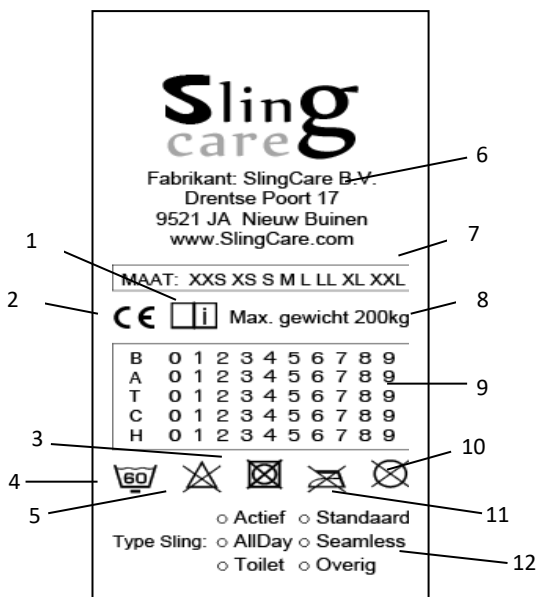

Informatie op etiket:

1. Gebruiksaanwijzing lezen
2. CE-logo
3. Niet drogen (symbool)
4. 60° wassen (symbool)
5. Niet bleken (symbool)
6. Gegevens leverancier
7. Maat aanduiding
8. Maximale belasting
9. Batchnummer
10. Niet droog reinigen (symbool)
11. Niet strijken (symbool)
12. Type sling

Sling Calculator

- Direct advies welke maat sling u nodig heeft
- Direct advies welke type sling u nodig heeft
- Direct inzicht in ons assortiment

De SlingCare App is beschikbaar voor Apple en Android. Ga naar de Appstore en zoek op SlingCare.



Fabrikant:

SlingCare B.V., Drentse Poort 25a, 9521 JA Nieuw-Buinen

www.slingcare.com

Indien u vragen heeft, kunt u telefonisch contact met ons opnemen via
+31 (0)599-639 614 of via e-mail info@slingcare.com

Op alle leveringen gelden de verkoopvoorwaarden van SlingCare.
SlingCare is een innovatief bedrijf en behoudt zich het recht voor om
zonder voorafgaande aankondiging de technische specificaties te wijzigen.