

## Tilbeugel voor zelfstandig tillen



### Een mooi hulpmiddel, maar geen vervanger voor de verzorging

De tilbeugel is speciaal ontwikkeld om, in situaties waar dat kan, personen te helpen om zichzelf m.b.t. een plafondlift te tillen en verplaatsen. Vooraf kan echter nooit met 100% zekerheid worden gegarandeerd of de tilbeugel een (volledige) oplossing biedt, hiervoor wordt geadviseerd het de tilbeugel gecombineerd met een plafondlift uit te proberen in onze showroom in Deventer.

De tilbeugel is een hulpmiddel dat mogelijkheden biedt om zelfstandig te gebruiken, maar er wordt wel iets van de gebruiker gevraagd, en het zal dus nooit de functie van een verpleger/verzorger geheel kunnen vervangen. Het juist positioneren, draaien in de tillift e.d., vraagt soms enige oefening en toevoeging van extra hulpmiddelen zoals wandbeugels e.d.

### Waarvoor is de tilbeugel bedoeld

De "Independent" tilbeugel is ontworpen voor gebruik in combinatie met onze Prism Medical plafondliften uitgerust met een Quick Release System (QRS) haak en railsystemen. De tilbeugel is voornamelijk bedoeld voor cliënten met:

- voldoende kracht in het bovenlichaam, hoofd- en nekcontrole,
- voldoende rompbalans / heupcontrole
- voldoende grijpkracht en "enige" kracht in de romp- en bekkenspiers.
- Afhankelijk van de eigen mogelijkheden van de gebruiker is de kracht die de beugel op de gebruiker uitoefent in drie standen instelbaar, voor maximaal comfort of ondersteuning.


In de regel geldt dat als de gebruiker zelfstandig rechtop op de rand van een bed zou moeten kunnen zitten, de tilbeugel voldoende ondersteuning zal bieden voor het zelfstandig uitvoeren van een transfer van dat bed naar bijvoorbeeld een rolstoel.

Algemene informatie tilbeugel voor zelfstandig uitvoeren van transfers. Let op de situatie voor uw specifieke project kunnen afwijken, informeer hiervoor bij een van onze adviseurs en voer een passing uit in onze showroom!

### Railverloop en type plafondlift

Om zelfstandig transfers uit te kunnen voeren moet zorgvuldig worden nagedacht over het verloop van het railsysteem. Soms kan met een eenvoudig railverloop worden volstaan voor bijvoorbeeld een transfers uit bed in de rolstoel, maar zodra er ook transfers naar een douchestoel gemaakt moeten worden staat al snel een van de stoelen in de weg. Inventariseer daarom goed welke transfers gewenst zijn, en welke posities daarbij belangrijk zijn. Is er voldoende ruimte? Staat er niets in de weg?

Uiteraard dient de plafondlift en eventueel een XY systeem te zijn voorzien van elektrische aandrijfmotoren en is het handig het systeem uit te voeren met een afstandsbediening. Dergelijke opties zijn niet standaard, en zullen expliciet vermeld moeten staan op uw offerte.

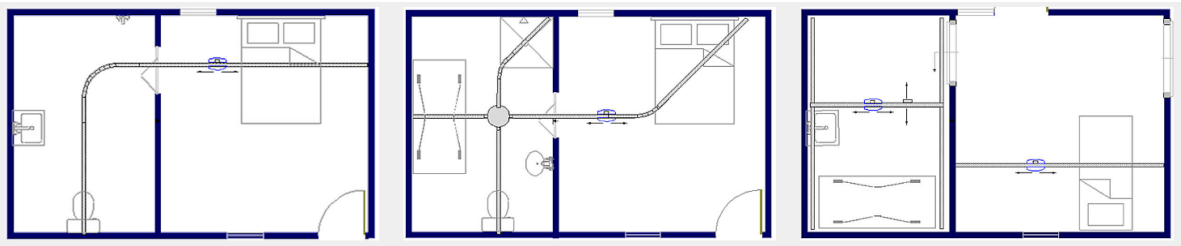


### Tilhoogte

De tilbeugel neemt verhoudingsgewijs meer ruimte in dan een standaard tiljuk met tilbanden, bovendien zit de gebruiker in de tilbeugel rechtop waarbij de benen en voeten omlaag hangen. Afhankelijk van de hoogte van het plafond en hoogte van de uit te voeren transfers (bed / rolstoel / douchestoel) moet worden bepaald of er voldoende tilhoogte is.

Met name het tillen van de voeten/benen over het bed of bijvoorbeeld de rand van een bad lukt soms niet, vanwege het gebrek aan hoogte. Raadpleeg hiervoor een van onze adviseurs en voer een passing uit in onze showroom, zodat we kunnen meten in hoeverre of uw gewenste transfers mogelijk zijn.

Onderstaande illustratie geeft een indicatie van de hoogte, uitgaande van een gebruiker met een eigen lengte van 185 cm, en een gemeten afstand van onder de oksels tot onderzijde zitvlak van circa 50 cm. (Meet eventueel de maat vanaf de oksel van de gebruiker tot op de zitting van de rolstoel).

Algemene informatie tilbeugel voor zelfstandig uitvoeren van transfers. Let op de situatie voor uw specifieke project kunnen afwijken, informeer hiervoor bij een van onze adviseurs en voer een passing uit in onze showroom!

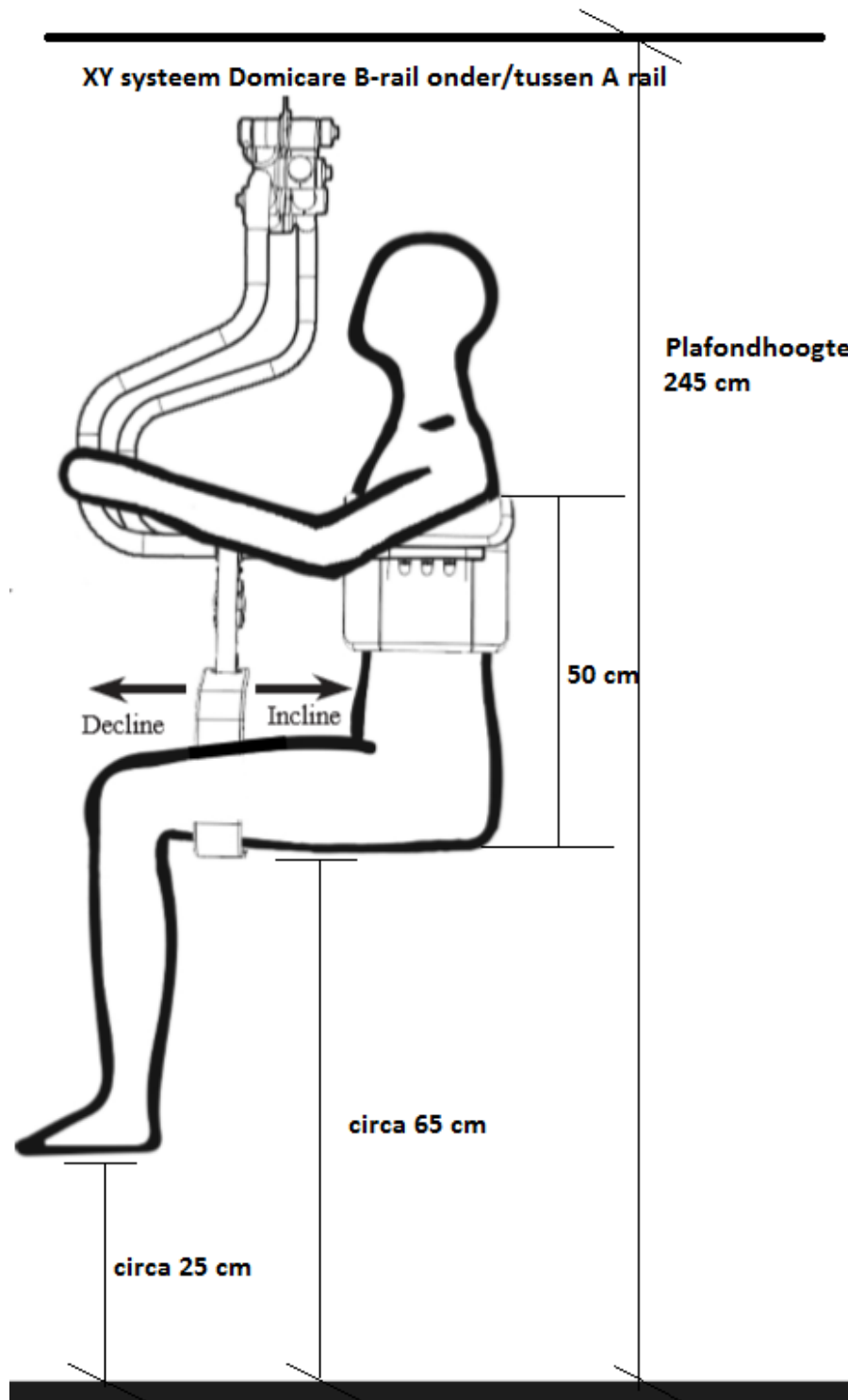

**LET OP:** aan bovenstaande illustratie kunnen geen rechten worden ontleend, de situatie verschilt per situatie en gebruiker, voer hiervoor een passing in onze showroom uit!

Algemene informatie tilbeugel voor zelfstandig uitvoeren van transfers. Let op de situatie voor uw specifieke project kunnen afwijken, informeer hiervoor bij een van onze adviseurs en voer een passing uit in onze showroom!