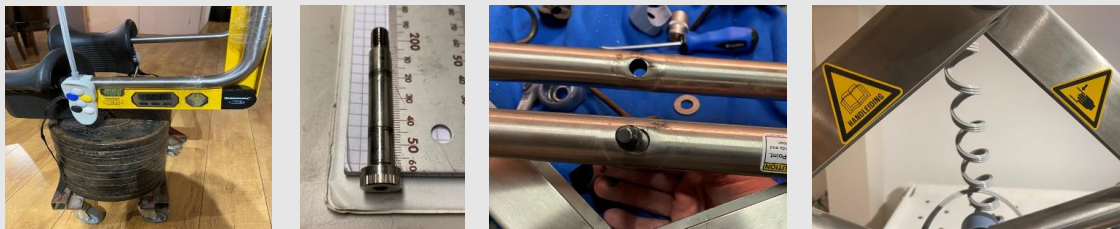



## INTERNE Werkinstructie en checklist keuren Independent Hanger

Conform NEN 7506:2011 V.2.0 december 2020

*Tilbeugels dienen tenminste afhankelijk van gebruik eenmaal of tweemaal per kalenderjaar te worden gekeurd, te beoordelen door een door Domicare BV erkende keurmeester.*

<b><u>Visuele inspectie en mechanische belasting</u></b>		OK	NOK
<i>Logboek</i>	Tilbeugel staat geregistreerd in het logboek met vermelding van n.a.w. eigenaar, locatie, merk en type, serienummer en bouwjaar		
<i>Historie</i>	Historisch overzicht van onderoud en reparaties is beschikbaar		
<i>RVS Frame</i>	Controleer het frame op beschadigingen of vervormingen		
<i>Bevestiging</i>	Controleer de zeflborgende moeren (doppen verwijderen, en handvast draaien)		
<i>Inspectie bouten en gaten</i>	Verwijder de bouten en controleer zowel de bouten als de gaten hiervoor in het RVS op beschadiging of vervorming.		
<i>Smeren</i>	Voorzien de bouten van olie om schade aan het RVS frame (uitlubberen gaten) te voorkomen		
<i>Kunststof elementen</i>	Controleer de kunststof elementen / afstandhouders op beschadiging en vervorming		
<i>Veer</i>	Controleer de veer op beschadiging en vervorming, op de juiste positie, controleer de werking (in gebruik vochtige ruimtes de veer eventueel voorzien van siliconenspray i.v.m. mogelijke oxidatie)		
<i>Sticker knelgevaar</i>	Is de tilbeugel voorzien van duidelijke stickers met waarschuwing knelgevaar, eventueel voorzien van stickers (beide zijden)		
<i>Handleiding en waarschuwings sticker</i>	Is in de nabijheid van de tilbeugel een actuele handleiding aanwezig inclusief de waarschuwing voor knelgevaar, is de tilbeugel voorzien van duidelijke stickers met waarschuwing "HANDLEIDING" (gele driehoek)		
<i>Aanpassingen</i>	Aan de tilbeugel zijn geen aanpassingen gedaan die in strijd (zouden kunnen) zijn met de hiervoor geldende normen en richtlijnen (NEN-ISO 10535)		
<i>Mechanische sterkte</i>	Belast de tilbeugel evenredig met 200 kg en voer een algehele functietest / visuele inspectie uit		
			
<b><u>Inspectie van de beenbeugels en bevestiging (sjorbanden)</u></b>		OK	NOK
<i>Stalen beugels</i>	Controleer de beenbeugels op beschadiging en vervorming (haarscheurtjes in lak die kunnen duiden op vervorming / overbelasting).		
<i>Sjorbanden</i>	Controleer de sjorbanden op beschadiging en vervorming (rafelen), de sjorbanden moeten zijn voorzien van klemgesp met veer en metalen schuif met sleuven voor het borgen van de band.		
<i>Klemgesp</i>	Controleer de klemgesp op beschadiging en vervorming, de gesp moet zijn voorzien van een goed werkende veer. Controleer de werking van de klemgesp en aanwezigheid van metalen schuif.		
<b><u>Inspectie van de bevestiging aan de hijsband</u></b>		OK	NOK
<i>Prism Quick release karabijnhaak</i>	Controleer de of de rode sluiting van de quick release haak goed is geborgd (deze zijwaarts belasten met een pen of schroevendraaier), controleer of de borging goed terugveert		
<i>Karabijnhaken algemeen</i>	Controleer de karabijn op beschadiging en vervorming, controleer de goede werking van sluitingen		
			

<b><u>Plaatsen sticker maximale belasting en CE</u></b>		<b>OK</b>	<b>NOK</b>
200 kg doorhalen	Haal de omschrijvingen "safe working load" van 200 kg door met een goede watervaste stifft, gebruik hierbij een liniaal voor een mooie rechte lijn.		
125 kg plaatsen	Plaats de gele sticker met "max. belasting 125 KG" aan de bovenzijde van de tilbeugel.		
CE merkteken	Plaats de transparante sticker met 'CE' op de buis van het frame.		
			
<b><u>Resultaat van de keuring</u></b>		<b>OK</b>	<b>NOK</b>
Goedgekeurd	De tilbeugel is gekeurd en vertoont geen mankementen, vervormingen of bschadigingen die de waardoor de veilige werking van de tilbeugel niet kan worden gewaarborgd.		
Afgekeurd	De tilbeugel is afgekeurd, omdat:		
<b>Datum keuring:</b>			
<b>Naam controleur:</b>			
<b>Handtekening controleur:</b>			